


歩行器の安定性と、四点杖の  
使いやすさを兼ね備えた!

Welfan

# あゆめ〜るMgW

こんな方  
におすすめ!


すいすい!

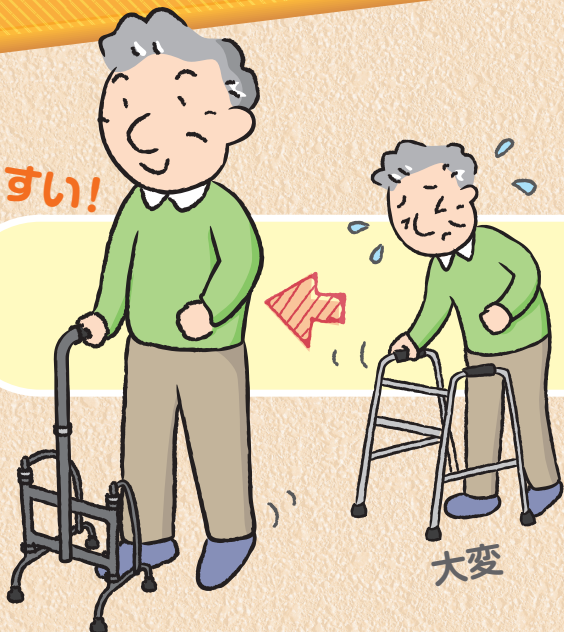

片麻痺等で両手で  
歩行器が使えない方


大変

四点杖では、  
ぐらついて不安がある方

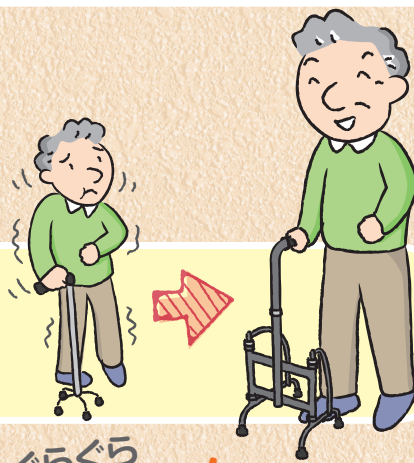

ぐらぐら

しっかり!

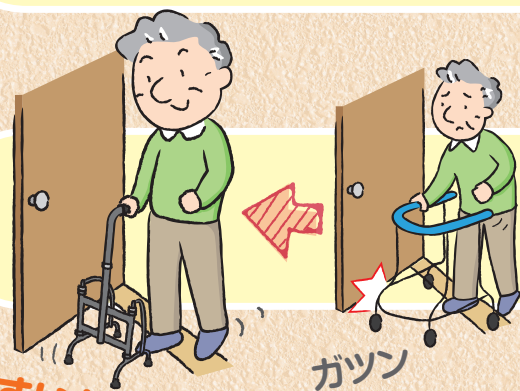

すいすい!

ガツン

狭い場所で補助具が  
邪魔で困っている方


広い基底面でしっかり安定するため、  
安心して一歩目が踏み出せます。

足の運びがスムーズに  
なるため、歩行が安定し、  
歩行速度の向上が  
期待できます。

9930

45,000円 (非課税)

重量	最大使用者体重	折時 幅	折時 奥行
(S)約1.2kg (M)約1.3kg	100kg	46cm	8.5cm

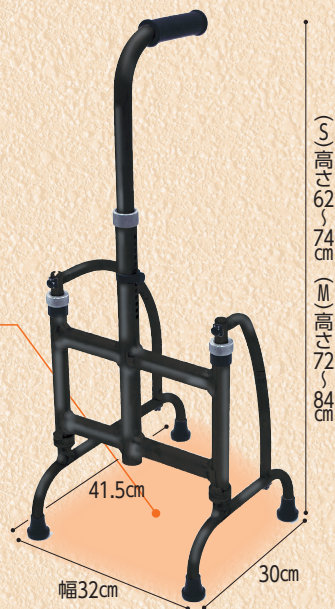



## 左手・右手用の左右兼用タイプ



左手用使用時




右手用使用時



短フレーム側の脚、長フレーム側の脚、センターグリップと順番に回すことで、左右兼用でご使用いただけます。

## コンパクト収納が可能です。

折たたんでコンパクトに収納でき、自立するので、置き場所に困りません。

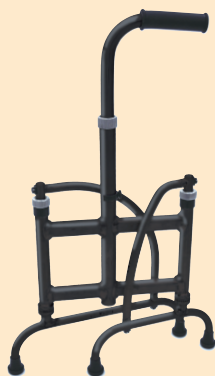

センターグリップに1か所ある横方向の穴でセンターグリップを固定し、短フレーム、長フレームがそれぞれ逆方向に回すと、折りたたむことができます。



### フレーム角度調節歯車

- 回転部分にある歯車で15°ずつ角度調節が可能です。



- 外側に来る足が、片麻痺等で内転する方は、外側足のフレーム短側の脚を内側へ調節すると、フレーム脚が邪魔にならず、歩きやすくなります。

### 4点接地アジャスター

- 4点接地できるよう調節できるアジャスター付きなので、安心してご使用いただけます。

9930

45,000円 (非課税)

重量	最大使用者体重	折時幅	折時奥行
(S)約1.2kg (M)約1.3kg	100kg	46cm	8.5cm

- グリップ高さ / (Sサイズ) 62cm~74cm (Mサイズ) 72cm~84cm ※1cmピッチで調節可能です。
- フレーム / マグネシウム合金
- カラー / 青墨
- サイズ / S、M
- TAISコード / (S) 00082-000041 (M) 00082-000042

販売店

 株式会社 ウェルファン

〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28番32号  
TEL050-2018-0954 FAX072-832-5412  
<http://www.welfan.co.jp/>