



介護と 予防

据置きタイプ手すり 設置事例②

前回のスムーズィに引き続き、今回も据置き手すりの設置事例をご紹介します。
パナソニックはこれまでに様々な場所やシーンでお使いできる手すり商品を展開してきました。
ご利用者様の状態や希望、住宅環境などによって最適な手すりは異なります。
今回ご紹介する事例をお読みいただき、ご利用者様に合わせた選定の参考にしてください。


折りたたみ可能な面手すり スタンディ

面手すりだから安定した動作ができる!



歩行サポート手すり スムーズィ

玄関先のアプローチに、
工事不要で手すりが設置可能!

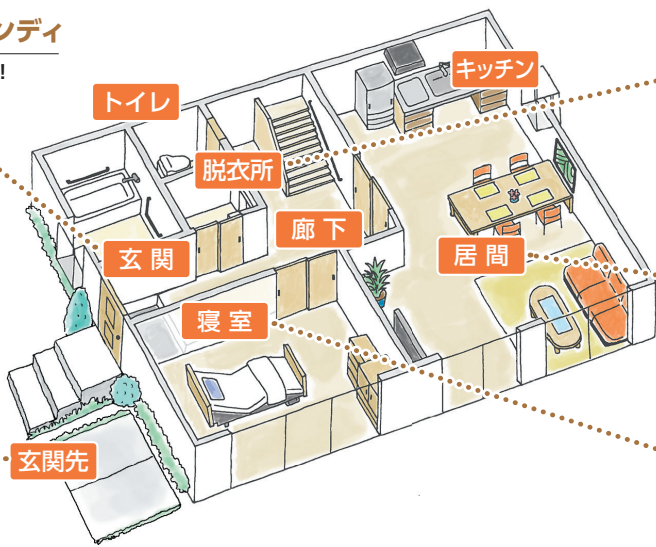

NEW
自在手すり
ツインディ〈水廻り用〉
あらゆる水廻りに設置可能。



NEW
歩行サポート手すり
スムーズィ〈屋内用〉
お家の中の移動をしやすく。
廊下などのつたい歩きを
サポート。



自在手すり
ツインディ〈室内用〉
力が入りやすい腕の形に
合わせられる。



設置事例その① ツインディ〈室内用〉ベッド横使用例

◆ 手すりが必要になった背景

右大腿骨骨折により歩行困難となるが、立位保持は可能。ポータブルトイレを導入するが、移乗のときに掴まる物がなく転倒の危険性がある。一部介助で介護者の負担が大きい。



そこでツインディを選定

角度調整ができるツインディをベッド横に設置することで、移乗が安全に行えるようになった。立位姿勢も安定するため、排泄時の衣類の上げ下げを自力で促す自立支援も可能となり、介護者の負担が軽減された。

Point

① 導入前の課題

- 右大腿骨骨折により転倒の危険
- ベッド周辺に掴まるものがない
- 介護者の負担が大きい

② 導入後

- 手すりの角度調整をすることで移乗動作が安定するようになった
- 転倒のリスクが軽減
- 介護者の負担が軽減


骨折をして家で生活できるか心配だったけど、移乗やトイレが安心してできるようになって良かったわ。



設置事例その② スタンディ 玄関使用例

◆ 手すりが必要になった背景

下肢筋力が低下しており、パーキンソン病も持っているため、上がり框からの立ち上がり動作が難しい。

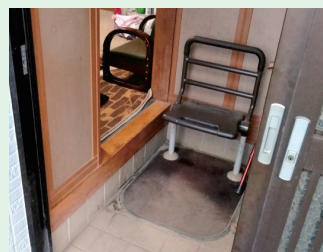

そこでスタンディを選定

スタンディを玄関に設置し、面手すり部分を使うことで、下半身の筋力を補いながら安定して立ち上がることができるようになった。折りたたみ機能を使うことでコンパクトになり、狭い玄関でも家族が通るときの動線を確保できた。

Point

① 導入前の課題

- 下肢筋力低下とパーキンソン病のため立ち上がり困難
- 玄関のスペースが狭い

② 導入後

- 上がり框からの立ち上がりが面が補助
- 折りたたみ機能を使い動線を確保

棒と面の手すりがあるから動作に合わせて使い分けられる優れたものね!



面手すりを使うと立ち上がりがラクになったわ。折りたためて場所を取らないのも嬉しいわね。



家の中の動線と移動をサポートする手すりに新商品が出ました!

裏面をご覧ください

パナソニックの手すりはラインナップが充実!

新商品追加で、ご利用者様の身長や状況、住宅環境に合わせ、選択肢がますます拡がりました!

歩行サポート手すり スムーディ<屋内用>

品番: XPN-L80801 希望小売価格: ¥82,000 (税抜)

2020年
10月26日
発売

介護保険
貸与対象品目

お家の中の移動を
しやすく、廊下などの
つたい歩きをサポート

寝室	居間	廊下	トイレ
脱衣所	キッチン	玄関	玄関先
■ おすすめ使用場所		■ 使用可能な場所	

!!こんな困りごとを解決!!

廊下に手すりが
取り付けられない

天井強度が弱いと
突っ張りタイプの
手すりが設置できない

背が高くて手すりが
つかみにくい



自在手すり ツインディ<水廻り用>

品番: PN-L80701 希望小売価格: ¥128,000 (税抜)

2020年
12月7日
発売

介護保険
貸与対象品目

水廻り環境での
転倒リスクの軽減や
一連の動作をサポート

寝室	居間	廊下	トイレ
脱衣所	キッチン	玄関	玄関先
■ おすすめ使用場所		■ 使用可能な場所	

!!こんな困りごとを解決!!

水廻りでも
安心できる
支えが欲しい

狭い場所にも
置きたい

濡れると
お手入れが大変



両足が乗る ひろびろベース



廊下にぴったりな幅60cmのベース。支柱位置も壁寄りですっきり。

手すり高さは MAX85cm



少し高い位置で持ちたい方にもオススメ

さまざまな水廻りに対応



キッチンや脱衣所、洗濯機前でも立ち座りやつたい歩きをサポート

手すり角度は 調整可能



使いやすさに合わせて角度調整可能(片側30度ピッチ4段階)



パーキンソン病などでふらつきがある場合は、胸～お腹の高さで持つ方が安定しやすいです

防かび加工 SIAA[®] 防カビ加工



※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。使用条件によってはかびが発生することがあります。
※防かび剤は経年的に流出してしまいますが、SIAAが定めた条件での試験では従来品より効果が約3倍持続します。
※水垢など商品に付着したものの上には発生したかびについては効力はありません。
※防かび剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。

今回は

据置タイプ手すり設置事例③をご紹介します。

製造元

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048
製品に関するお問合せ

☎ 0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

上記品揃え以外も取り揃えております。

プレポ

バックナンバーはこちら
ご確認いただけます



*データ通信料は、お客様負担となります。*お使いになる機器によってはご覧いただけません。あらかじめご了承ください。

当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ スムーディの特徴をご紹介します



▶ 2020年秋発売
新商品ご紹介動画はこちら



販売元



介護用品・福祉用具の流通にイノベーションを

株式会社 ウェルファン

〒572-0085 大阪府寝屋川市香里新町28番32号
TEL050-2018-0954 FAX072-832-5412

このチラシの記載内容は2020年12月現在のものです。

ご利用は